


電極パッド取付け・交換方法


準備するもの

1 AED本体


AED-9100/9110/9200

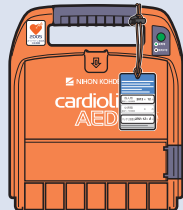


AED-9231

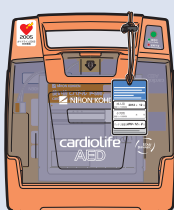

AED-1200

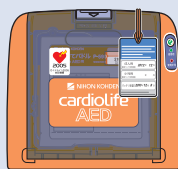


2 電極パッド

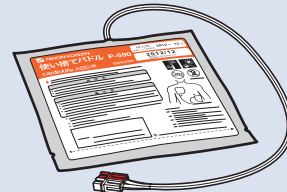


1 パッドの使用期限シールをAED日常点検タグに貼り付ける

- 新しい使用期限シールをAED日常点検タグに貼ります。

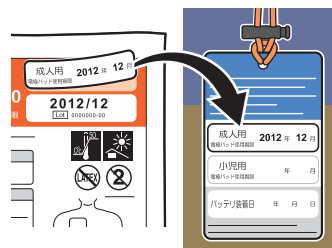


2 ラッチを押してフタを開ける


- フタを開けると自動的に電源が入り、音声ガイドが聞こえます。

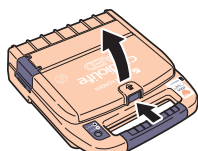

AED-9100/9110/9200

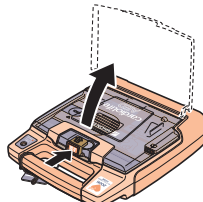


AED-9231

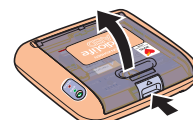


AED-1200

3 古い電極パッドを取り外す


- コネクタを持って、AED本体から電極パッドを抜きます。

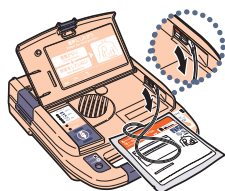

AED-9100/9110/9200

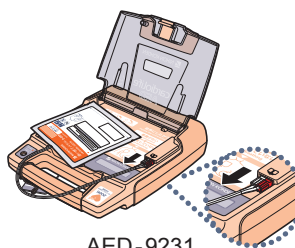

AED-9231


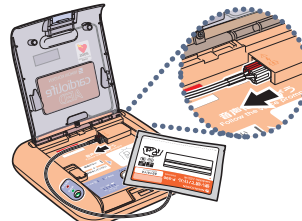


AED-1200


4 新しい電極パッドを接続する

- コネクタの色を合わせて差し込みます。


※赤は赤、白は白に合わせて差し込みます。

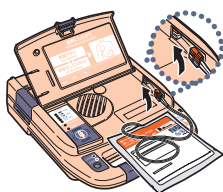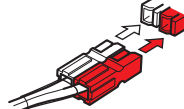

AED-9100/9110/9200

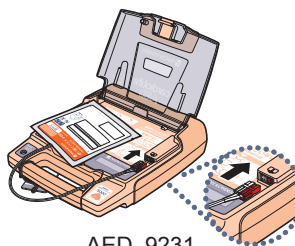

AED-9231

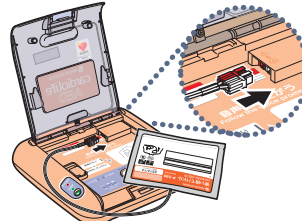


AED-1200

電極パッド取付け・交換方法

5 電極パッドを収納し、フタを閉じる（電極パッドのケーブルをフタにはさまないように注意します。）

AED-9100/9110/9200

- 1 電極パッドを装置に収納します。

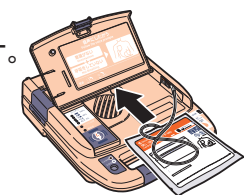


- 2 余ったケーブルをループさせてフタを閉じます。




AED-9231

- 1 電極パッドをフタに収納します。

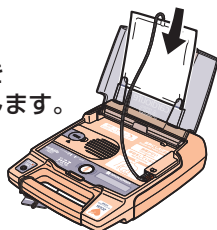


- 2 余ったケーブルをループさせてフタを閉じます。

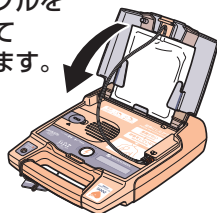


AED-1200

- 1 電極パッドをフタに収納します。

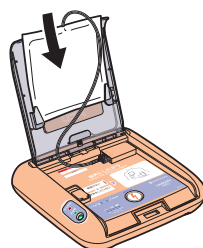


- 2 ケーブルをケーブルガイド（3カ所）に通してフタを閉じます。

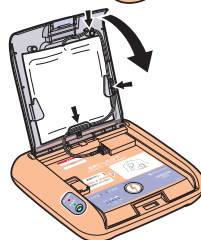

6 ステータスインジケータが緑色(使用可)であることを確認する




ステータスインジケータ

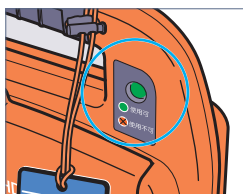

AED-9100/9110/9200





AED-9231

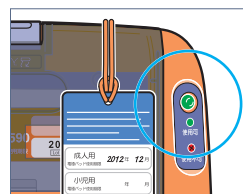


AED-1200

7 各収納ケースに設置する

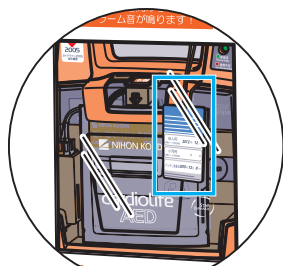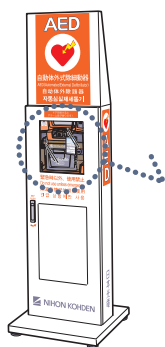

収納ケース

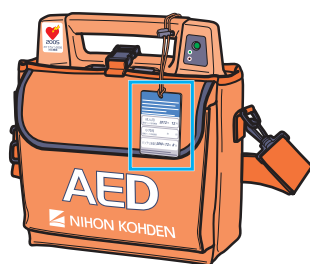


AED用キャリングバッグ

注意

各収納ケースに収納する場合は、電極パッドの使用期限とバッテリーの使用開始日の表示が、キャリングバッグや収納ケースの外からでも必ず見えるように収納してください。

8 AEDの日常点検

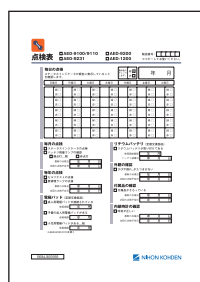

- 取扱説明書にある点検表を使用して、AEDの日常点検を実施します。

点検表は、当社ホームページ
<http://www.nihonkohden.co.jp/aed/dailycheck.html>
からもダウンロードできます。
必要に応じてご使用ください。

■ 使用済み／使用期限切れの電極パッドの廃棄について

- ① 使用している場所が医療機関の場合
使用済み／使用期限切れの電極パッドは、シートとパッケージも含めて、医療廃棄物として専門業者に依頼し、速やかに廃棄してください。
- ② 使用している場所が医療機関以外の場合
各自治体の指示に従って速やかに廃棄してください。

日本光電

<http://www.nihonkohden.co.jp/>

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560

☎(03)5996-8000 (代表) Fax.(03)5996-8091

AED保守受付センタ 0120-233-821