

電極パッド取付け・交換方法

AED-2100

AED-2150/AED-2151/AED-2152

注意

使用済み／使用期限切れの電極パッドはすみやかに交換し、新しい電極パッドを接続してください。


準備するもの

1 AED本体




※イラストは AED-2100 です。

2 電極パッド

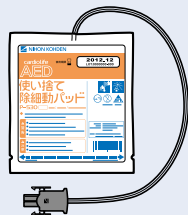


1 パッドの使用期限シールを貼り付ける

新しい使用期限シールを
AED日常点検タグに貼ります。

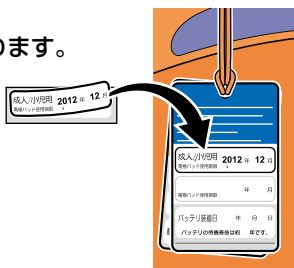


2 フタを開ける

電源スイッチを手前にスライドさせてフタを開けます。
フタを開けると自動的に電源が入り、
音声ガイドが聞こえます。

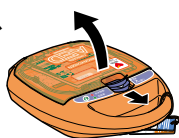

3 古い電極パッドを取り外す


コネクタ両側のつまみを持ち、
スライドさせて引き抜きます。

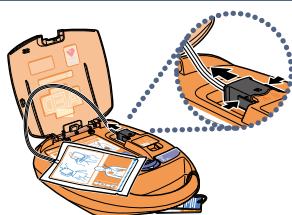


4 新しい電極パッドを接続する

1 コネクタの凹凸を
合わせて差し込みます。

※コネクタ部の溝にほこりなどが
付着していないことを確認して
ください。

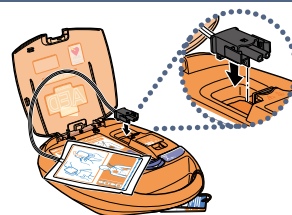

2 カチッと音がして
ロックがかかるまで
コネクタをスライドさせます。

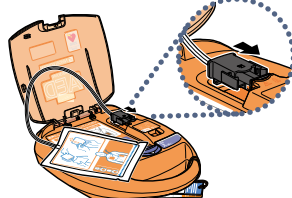


■ 使用済み／使用期限切れの電極パッドの 廃棄について

- ① 使用している場所が医療機関の場合
使用済み／使用期限切れの電極パッドは、シートとパッケージ
も含めて、医療廃棄物として専門業者に依頼し、速やかに廃棄
してください。
- ② 使用している場所が医療機関以外の場合
各自自治体の指示に従って速やかに廃棄してください。


5 電極パッドを収納し、フタを閉じる

(電極パッドのケーブルをフタにはさまないように注意します。)

1 電極パッドをフタに収納し、
ケーブルをケーブルガイド(3カ所)
にセットします。

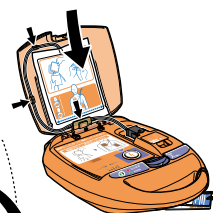

2 フタを閉じてロックします。
※電源スイッチをカチッと
音がするまで奥にスライド
させます。

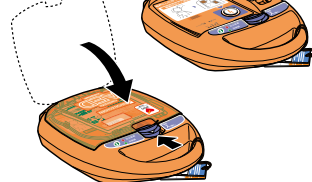

6 ステータスインジケータを確認する

ステータスインジケータが
緑色(使用可)であることを
確認します。




ステータスインジケータ

7 各収納ケースに設置する

注意

各収納ケースに収納する場合は、電極パッドの使用期限とバッテリーの
使用開始日の表示が、キャリングバッグや収納ケースの外からでも
必ず見えるように収納してください。

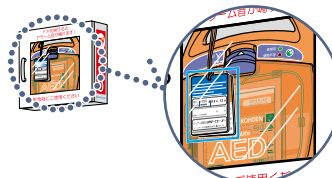

収納ケース



AED-2100用
キャリングバッグ

8 AEDの日常点検



取扱説明書にある点検表を使用して、
AEDの日常点検を実施します。
点検表は、当社ホームページ
[http://www.aed-life.com/
nihonkohden/dailycheck.html](http://www.aed-life.com/nihonkohden/dailycheck.html)
からもダウンロードできます。
必要に応じてご使用ください。