



準備するもの

1 AED本体

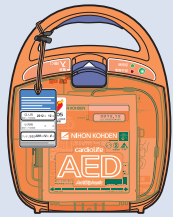

2 電極パッド

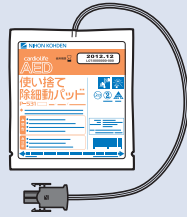


■ 使用済み／使用期限切れの電極パッドの廃棄について

- ① 使用している場所が医療機関の場合
使用済み／使用期限切れの電極パッドは、シートとパッケージも含めて、医療廃棄物として専門業者に依頼し、速やかに廃棄してください。
- ② 使用している場所が医療機関以外の場合
各自治体の指示に従って速やかに廃棄してください。


1 パッドの使用期限シールを貼り付ける

- 新しい使用期限シールをAED日常点検タグに貼ります。

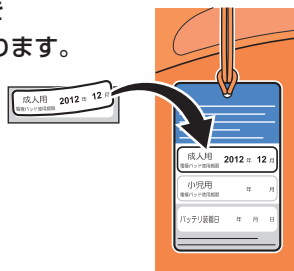


2 フタを開ける

- 電源スイッチを手前にスライドさせてフタを開けます。フタを開けると自動的に電源が入り、音声ガイドが聞こえます。

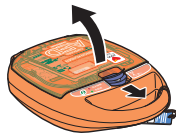

3 古い電極パッドを取り外す


- コネクタ両側のつまみを持ち、スライドさせて引き抜きます。

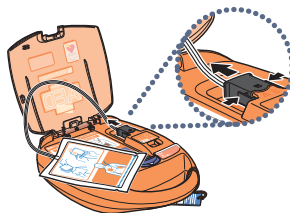


4 新しい電極パッドを接続する

- 1 コネクタの凹凸を合わせて差し込みます。

※ コネクタ部の溝にほこりなどが付着していないことを確認してください。

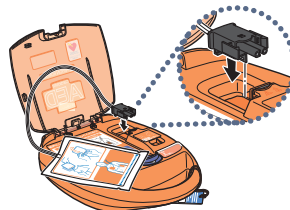

- 2 カチッと音がしてロックがかかるまでコネクタをスライドさせます。

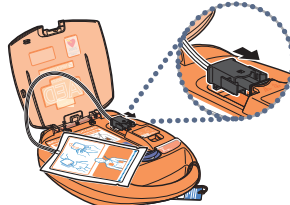


5 電極パッドを収納し、フタを閉じる

(電極パッドのケーブルをフタにはさまないように注意します。)

- 1 電極パッドをフタに収納し、ケーブルをケーブルガイド(3カ所)にセットします。

- 2 フタを閉じてロックします。
※ 電源スイッチをカチッと音がするまで奥にスライドさせます。

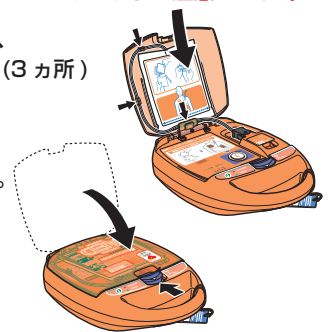

6 ステータスインジケータを確認する

- ステータスインジケータが緑色(使用可)であることを確認します。




ステータスインジケータ

7 各収納ケースに設置する

注意

各収納ケースに収納する場合は、電極パッドの使用期限とバッテリーの使用開始日の表示が、キャリングバッグや収納ケースの外からでも必ず見えるように収納してください。

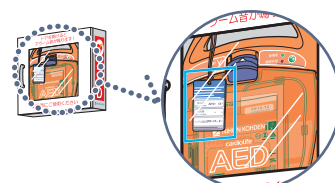

収納ケース



AED-2100用
キャリングバッグ

8 AEDの日常点検



- 取扱説明書にある点検表を使用して、AEDの日常点検を実施します。