

**注意** 使用済み／使用期限切れの電極パッドはすみやかに交換し、新しい電極パッドを接続してください。

## 準備するもの

### 1 AED




※イラストは AED-3100 です。

### 2 電極パッド



## 1 パッドの使用期限シールを貼り付ける

■ 新しい使用期限シールを  
設置管理タグに貼ります。

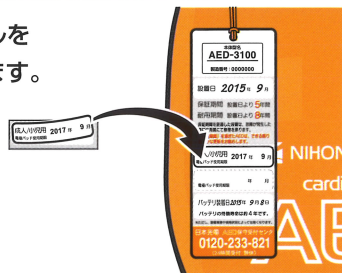

## 2 フタを開ける

■ 電源スイッチを手前にスライド  
させてフタを開けます。  
フタを開けると自動的に  
電源が入り、音声ガイドが  
聞こえます。



## 3 古い電極パッドを取り外す

■ コネクタ両側のつまみを  
持ち、スライドさせて  
引き抜きます。



## 4 新しい電極パッドを接続する

1 コネクタの凹凸を  
合わせて差し込みます。

※ コネクタ部の溝にほこり  
などが付着していないことを  
確認してください。



2 カチッと音がして  
ロックがかかるまで  
コネクタをスライド  
させます。



## ■ 使用済み／使用期限切れの電極パッドの 廃棄について

- ① 使用している場所が医療機関の場合  
使用済み／使用期限切れの電極パッドは、シートとパッケージ  
も含めて、医療廃棄物として専門業者に依頼し、速やかに廃棄  
してください。
- ② 使用している場所が医療機関以外の場合  
各自治体の指示に従って速やかに廃棄してください。

## 5 電極パッドを収納し、フタを閉じる

(電極パッドのケーブルをフタにはさまないように注意します。)

1 電極パッドをフタに収納し、  
ケーブルをケーブルガイド  
(3カ所) にセットします。



2 フタを閉じて  
ロックします。  
※ 電源スイッチをカチッと  
音がするまで奥にスライド  
させます。



## 6 ステータスインジケータを確認する

■ ステータスインジケータが  
緑色(使用可)であることを  
確認します。



## 7 設置する

### 注意

AEDを設置する際は、電極パッドの使用期限とバッテリーの  
使用開始日の表示が、必ず見えるように設置してください。



## 8 AEDの日常点検

■ 取扱説明書にある点検表を使用して、  
AEDの日常点検を実施します。  
点検表は、当社ホームページ  
[http://www.aed-life.com/  
nihonkohden/dailycheck.html](http://www.aed-life.com/nihonkohden/dailycheck.html)  
からもダウンロードできます。  
必要に応じてご使用ください。

